

## DEZZIV Brake&Go aktivna zavora, vam pomaga pri:



### 1. Vožnja predensko po klančini navzgor s pomočjo asistenta

Asistent potiska invalidski voziček po klančini predensko navzgor in kadarkoli se asistent ustavi ali pa spusti invalidski voziček, se le ta samodejno zavre in invalidski voziček nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati zadenjsko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, asistent enostavno prične potiskati invalidski voziček naprej po strmini navzgor in *Brake&Go* aktivna zavora to samodejno omogoči. *Brake&Go* aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po strmini navzdol.

### 2. Samostojna vožnja predensko po klančini navzgor

Uporabnik invalidskega vozička se samostojno predensko vzpenja po klančini navzgor in kadarkoli se uporabnik ustavi oziroma preneha vzpenjati, se invalidski voziček samodejno zavre in nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati zadenjsko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, uporabnik enostavno prične poganjati invalidski voziček naprej po strmini navzgor in *Brake&Go* aktivna zavora to samodejno omogoči. *Brake&Go* aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po strmini navzdol.

### 3. Vožnja zadenjsko po klančini navzgor s pomočjo asistenta

Asistent potiska ali vleče invalidski voziček po klančini zadenjsko navzgor in kadarkoli se asistent ustavi ali pa spusti invalidski voziček, se le ta samodejno zavre in nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati predensko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, asistent enostavno prične potiskati ali vleči invalidski voziček naprej po strmini navzgor in *Brake&Go* aktivna zavora to samodejno omogoči. *Brake&Go* aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po strmini navzdol.

#### 4. Samostojna vožnja zadenjsko po klančini navzgor

Uporabnik invalidskega vozička se samostojno zadenjsko vzpenja po klančini navzgor in kadarkoli se uporabnik ustavi oziroma preneha vzpenjati, se invalidski voziček samodejno zavre in nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati predensko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, uporabnik enostavno prične poganjati invalidski voziček zadenjsko po strmini navzgor in *Brake&Go* aktivna zavora to samodejno omogoči. *Brake&Go* aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po strmini navzdol.

#### 5. Pomoč pri speljevanju predensko po strmini navzgor

Ta funkcija deluje enako kot »pomoč pri speljevanju v klanec« pri avtomobilu. Ko se uporabnik invalidskega vozička samostojno ali pa s pomočjo asistenta, med vzpenjanjem predensko po strmini navzgor ustavi in se želi ponovno pričeti vzpenjati predensko po strmini navzgor, pred tem vklopi *Brake&Go* aktivno zavoro in takoj ko se prične ponovno vzpenjati se *Brake&Go* aktivna zavora samodejno izklopi in tako omogoči vzpenjanje in ostane izklopljena.

#### 6. Pomoč pri speljevanju zadenjsko po strmini navzgor

Ta funkcija deluje enako kot »pomoč pri speljevanju v klanec« pri avtomobilu. Ko se uporabnik invalidskega vozička samostojno ali pa s pomočjo asistenta, med vzpenjanjem zadenjsko po strmini navzgor ustavi in se želi ponovno pričeti vzpenjati zadenjsko po strmini navzgor, pred tem vklopi *Brake&Go* aktivno zavoro in takoj ko se prične ponovno vzpenjati se *Brake&Go* aktivna zavora samodejno izklopi in tako omogoči vzpenjanje in ostane izklopljena.

#### 7. Vzpenjanje po stopnicah navzgor s pomočjo asistenta.

Asistent »vleče« uporabnika invalidskega vozička po stopnicah navzgor. Kadarkoli asistent preneha »vleči« invalidski voziček, oziroma se le ta ustavi, *Brake&Go* aktivna zavora samodejno zavre invalidski voziček in le ta nima težnje da bi se pričel samodejno premikati po stopnicah navzdol. Pri ponovnem vzpenjanju po stopnicah navzgor, asistent enostavno ponovno prične »vleči« invalidski voziček po stopnicah navzgor in *Brake&Go* aktivna zavora to samodejno omogoči. *Brake&Go* aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po stopnicah navzdol.


## 8. Samostojno vzpenjanje po stopnicah

Uporabnik invalidskega vozička se s pomočjo rok in ograje »povleče« na stopnico. Takoj ko je na stopnici se Brake&Go aktivna zavora samodejno vklopi in zavre invalidski voziček. S tem prepreči, da bi se invalidski voziček pričel gibati po stopnicah navzdol. Sedaj se lahko uporabnik invalidskega vozička »povleče« na naslednjo stopnico. Brake&Go aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati po stopnicah navzdol. Brake&Go aktivna zavora se po potrebi povsem samodejno vklaplja oziroma izklaplja in tako omogoča samodejno vzpenjanje po stopnicah navzgor.

## 9. Zamenjuje standardno zavoro invalidskega vozička

Brake&Go aktivna zavora za invalidski voziček nadomešča tudi standardno zavoro invalidskega vozička in deluje povsem enako kot standardna zavora.

- Vklop Brake&Go aktivne zavore je lahko izveden z vlečenjem ali pa s potiskanjem vklopne ročice.**
- Model Top ima zavorno oblogo, ki se po potrebi lahko zamenja.**
- Vse zgoraj opisane funkcije, opravlja Brake&Go aktivna zavora tudi pri invalidskih vozičkih, ki imajo električno gnana kolesa.**
- Brake&Go aktivna zavora za invalidski voziček odpravlja tudi problem zdrsa pogonskega kolesa pri ročnih ali motornih »Handbike« pogonih**

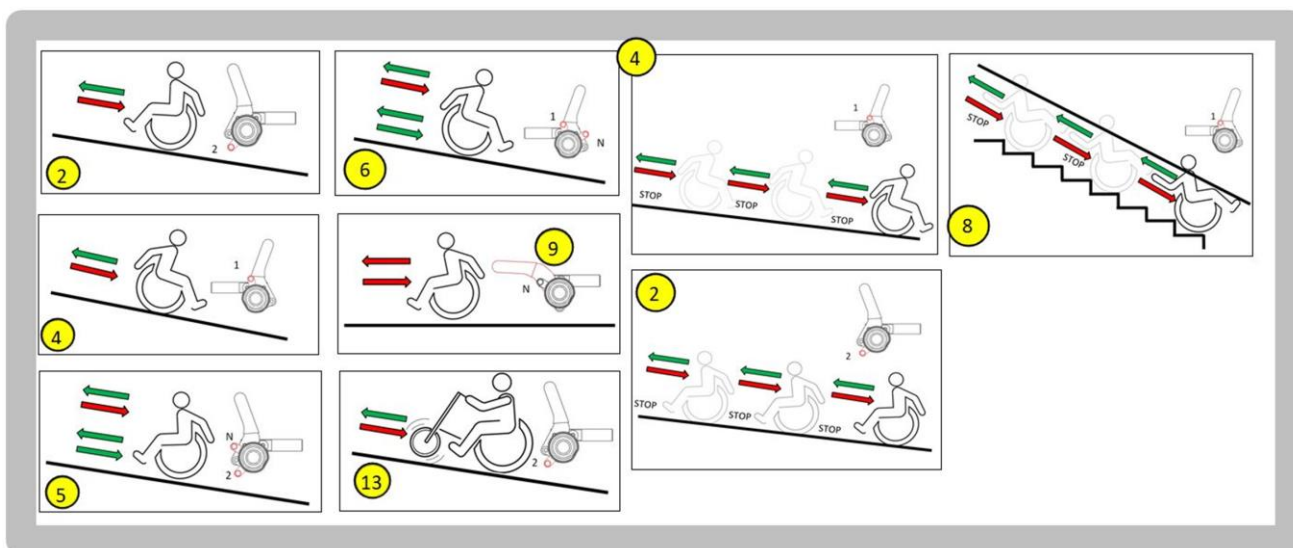

Funkcijska shema delovanja Brake&Go aktivne zavore